



# Aerosol SPA<sup>™</sup>

Pneumatic Purging-Mist Mode system




## 气水式清洗系统 洗鼻组使用说明书

### 气水珠冲洗途径 (图1)



### 洗鼻组：各项零组件 (图2)

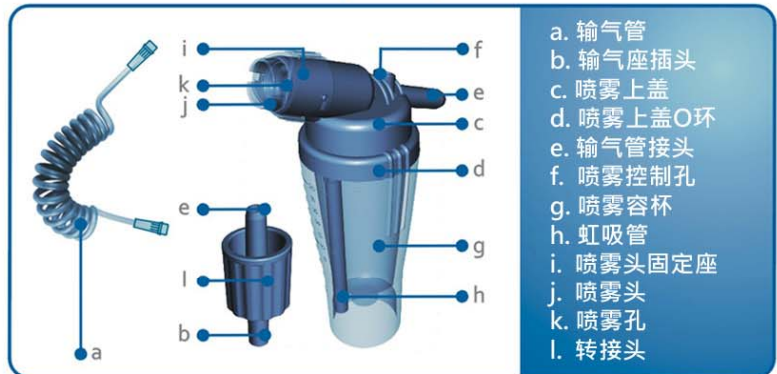

### 洗鼻组：组件操作 (图3)



### 洗鼻组：操作与清洁

#### 操作方法：

1. 旋转并打开喷雾上盖与喷雾容杯。
2. 注入适量生理食盐水 (约20c.c.)，再旋紧喷雾上盖与容杯。
3. 将输气管插入洗鼻组输气管接头。
4. 将输气管另一端插入转接头之输气管接头。
5. 将转接头之输气座插头植入过滤瓶之输气接头座。
6. 将过滤瓶或香滤瓶插入主机输气接头座。
7. 完成洗鼻组件与主机之连结。
8. 将喷雾头对准鼻端 (距鼻孔0~5mm)，头部微向后倾，口部微开，打开主机电源，以手指压住控制孔，以喷射气水珠清洗鼻腔。

#### 清洁方法：

1. 将洗鼻组件再空喷约十数秒钟，如此可排空溶液，避免残余盐结晶阻塞喷雾孔。
2. 拆卸输气管之连接，将喷雾容杯内剩余生理食盐水倒掉。
3. 用清水充分清洗洗鼻组件，清水冲洗毕，请用纸巾拭干，放置阴凉处约1~2小时使其自然干燥。
4. 洗鼻组件可使用高温消毒锅或沸水蒸煮约10分钟灭菌，过滤瓶及卷管为过滤及进出气作用，不须蒸煮清洗。

#### 注意：

1. 本洗鼻组件适用于所有年龄，建议由成年人协助幼童操作。
2. 喷洗时维持正常呼吸，可将气水珠导入鼻腔更深部位。
3. 洗鼻组设计为无压迫性，以连续喷雾方式清洗鼻腔，可适用于鼻腔阻塞，清洗液汇集口中吐掉即可，偶尔咽入亦无妨。
4. 本洗鼻组件为耗材，建议使用三至六个月依实际状况予以更新，以保持最佳使用效率。
5. 过滤瓶为过滤脏污空气之用途，建议每二个月定期更换新品，若过滤瓶容易跳脱主机时应即更换，如操作环境空污条件较差，需增加更换频率。卷管建议每三至六个月更换一次。

#### 禁止：

1. 请勿将喷雾头与喷雾上盖自行拆解，此举可能导致损坏或阻塞。
2. 请使用生理食盐水，切勿将一般食盐融化水中使用，将可能导致洗鼻组之喷雾头雾化功能阻塞。
3. 请勿使用清洗隐形眼镜之专用生理食盐水，该生理食盐水含有其它化学配方，可能造成鼻腔内不适刺激感。
4. 如有喷雾阻塞或不顺，请与购买之经销商联络，请勿任意使用其它工具钻挖喷雾头，有可能导致损坏或阻塞。
5. 本产品所有附属接触人体之各项配件/零组件，切勿与他人共享，以避免疾病交互传染。