



# Aerosol SPA

Pneumatic Purgin-Mist Mode system


## 气水式清洗系统 洗喉组使用说明书



洗喉组可用于清洗及润湿喉部 (图1)



洗喉组：各项零组件 (图2)

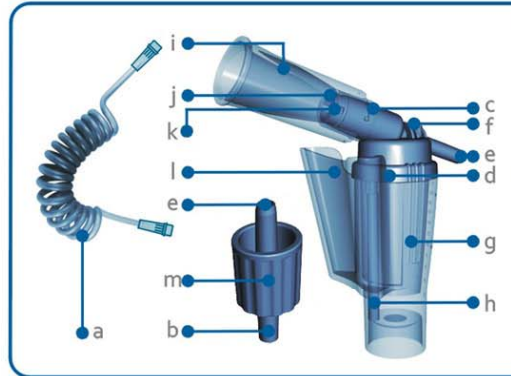

- a. 输气管
- b. 输气座插头
- c. 喷雾上盖
- d. 喷雾上盖O环
- e. 输气管接头
- f. 喷雾控制孔
- g. 喷雾容杯
- h. 虹吸管
- i. 咽喉喷雾喷嘴
- j. 喷雾头
- k. 喷雾孔
- l. 回收容杯
- m. 转接头

洗喉组：组件操作 (图3)



洗喉组：操作与清洁

操作方法：

1. 旋转并打开喷雾上盖与喷雾容杯。
2. 注入适量生理食盐水 (约20c.c.)，再旋紧喷雾上盖与容杯。
3. 将输气管插入洗喉组输气管接头。
4. 将输气管另一端插入转接头之输气管接头。
5. 将转接头之输气座插头植入过滤瓶之输气接头座。
6. 将过滤瓶或香滤瓶插入主机输气接头座。
7. 完成洗喉组件与主机之连结。
8. 将咽喉喷雾喷嘴含入口腔，打开主机电源，以手指压住控制孔，以喷射气水珠清洗咽喉部。

清洁方法：

1. 将洗喉组件再空喷约十数秒钟，如此可排空溶液，避免残余盐结晶阻塞喷雾孔。
2. 拆卸输气管之连接，将喷雾容杯内剩余生理食盐水倒掉。
3. 用清水充分清洗洗喉组件，清水冲洗毕，请用纸巾拭干，放置阴凉处约1~2小时使其自然干燥。
4. 洗喉组件可使用高温消毒锅或沸水蒸煮约10分钟灭菌，过滤瓶及卷管为过滤及进出气作用，不须蒸煮清洗。

注意：

1. 本洗喉组件适用于所有年龄，建议由成年人协助幼童操作。
2. 本洗喉组件设计为无压迫性，以连续喷雾方式清洗咽喉部，清洗液汇集口中吐掉即可，偶尔咽入亦无妨。
3. 喷雾冲洗咽喉部时，其部分清洗液会自动流入回收容杯内，清洗完再将回收容杯洗净。
4. 经常清洗喉咙可常保口气清新。
5. 本洗喉组件为耗材，建议使用三至六个月依实际状况予以更新，以保持最佳使用效率。
6. 过滤瓶为过滤脏污空气之用途，建议每二个月定期更换新品，若过滤瓶容易跳脱主机时应即更换，如操作环境空污条件较差，需增加更换频率。卷管建议每三至六个月更换一次。

禁止：

1. 请勿将喷雾头与喷雾上盖自行拆解，此举可能导致损坏或阻塞。
2. 请使用生理食盐水，切勿将一般食盐融化水中使用，将可能导致洗喉组之喷雾头雾化功能阻塞。
3. 请勿使用清洗隐形眼镜之专用生理食盐水，该生理食盐水含有其它化学配方，可能造成咽喉部不适刺激感。
4. 如有喷雾阻塞或不顺，请与购买之经销商联络，请勿任意使用其它工具钻挖喷雾头，有可能导致损坏或阻塞。
5. 本产品所有附属接触人体之各项配件/零组件，切勿与他人共享，以避免疾病交互传染。