



Aerosol SPATM

Pneumatic Purging-Mist Mode system




氣水式清洗系統 噴鼻組使用說明書

氣水珠沖洗途徑 (圖1)



噴鼻組：各項零組件 (圖2)

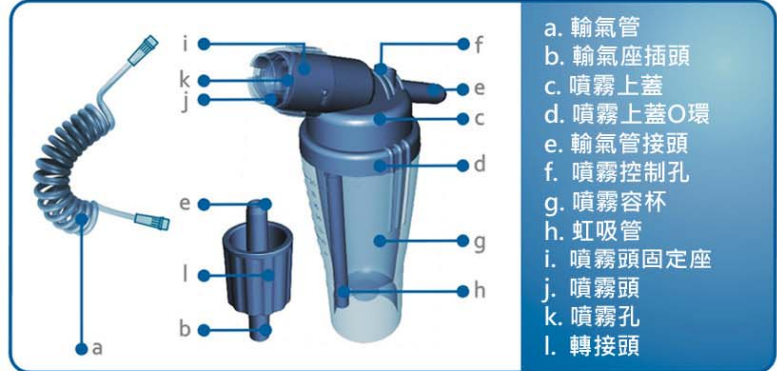

噴鼻組：組件操作 (圖3)



噴鼻組：操作與清潔

操作方法：

1. 旋轉並打開噴霧上蓋與噴霧容杯。
2. 注入適量生理食鹽水 (約20c.c.)，再旋緊噴霧上蓋與容杯。
3. 將輸氣管插入噴鼻組輸氣管接頭。
4. 將輸氣管另一端插入轉接頭之輸氣管接頭。
5. 將轉接頭之輸氣座插頭植入過濾瓶之輸氣接頭座。
6. 將過濾瓶或香濾瓶插入主機輸氣接頭座。
7. 完成噴鼻組件與主機之連結。
8. 將噴霧頭對準鼻端 (距鼻孔0~5mm)，頭部微向後傾，口部微開，打開主機電源，以手指壓住控制孔，以噴射氣水珠清洗鼻腔。

清潔方法：

1. 將噴鼻組件再空噴約十數秒鐘，如此可排空溶液，避免殘餘鹽結晶阻塞噴霧孔。
2. 拆卸輸氣管之連接，將噴霧容杯內剩餘生理食鹽水倒掉。
3. 用清水充分清洗噴鼻組件，清水沖洗畢，請用紙巾拭乾，放置陰涼處約1~2小時使其自然乾燥。
4. 噴鼻組件可使用高溫消毒鍋或沸水蒸煮約10分鐘滅菌，過濾瓶及捲管為過濾及進出氣作用，不須蒸煮清洗。

注意：

1. 本噴鼻組件適用於所有年齡，建議由成年人協助幼童操作。
2. 噴洗時維持正常呼吸，可將氣水珠導入鼻腔更深部位。
3. 噴鼻組設計為無壓迫性，以連續噴霧方式清洗鼻腔，可適用於鼻腔阻塞，清洗液彙集中吐掉即可，偶爾嚥入亦無妨。
4. 本噴鼻組件為耗材，建議使用三至六個月依實際狀況予以更新，以保持最佳使用效率。
5. 過濾瓶為過濾髒污空氣之用途，建議每二個月定期更換新品，若過濾瓶容易跳脫主機時應即更換，如操作環境空污條件較差，需增加更換頻率。捲管建議每三至六個月更換一次。

禁止：

1. 請勿將噴霧頭與噴霧上蓋自行拆解，此舉可能導致損壞或阻塞。
2. 請使用生理食鹽水，切勿將一般食鹽融化水中使用，將可能導致噴鼻組之噴霧頭霧化功能阻塞。
3. 請勿使用清洗隱形眼鏡之專用生理食鹽水，該生理食鹽水含有其他化學配方，可能造成鼻腔內不適刺激感。
4. 如有噴霧阻塞或不順，請與購買之經銷商聯絡，請勿任意使用其他工具鑽挖噴霧頭，有可能導致損壞或阻塞。
5. 本產品所有附屬接觸人體之各項配件/零組件，切勿與他人共用，以避免疾病交互傳染。